


检测步骤

- (1) 洗手或消毒，擦干双手
- (2) **检查**试剂配件（建议恢复到室温）
- (3) **查看**有效期（拭子、铝箔袋等包装印刷日期）
- (4) 正确打开拭子袋取出拭子，不要触碰拭子头
- (5) **插入左鼻孔，刮鼻子内壁 5 次**
- (6) **然后移入右侧鼻孔，刮鼻子内壁 5 次**
- (7) 加入缓冲液，或撕开缓冲液铝箔袋
- (8) **将拭子浸入缓冲液内轻轻搅拌 15 次**
- (9) **挤压管壁，折断或取走拭子，盖上盖子**
静置 1 分钟
- (10) 打开铝箔袋，取出测试卡并平放（1 小时内要用掉）
- (11) **滴 4 滴在测试卡上，开始计时 15 分钟**
- (12) 15 分钟时间到，观察结果
时间超过 20 分钟，不建议继续观察
- (13) 装袋丢弃

QUICK GUIDE

REF C0VG10S

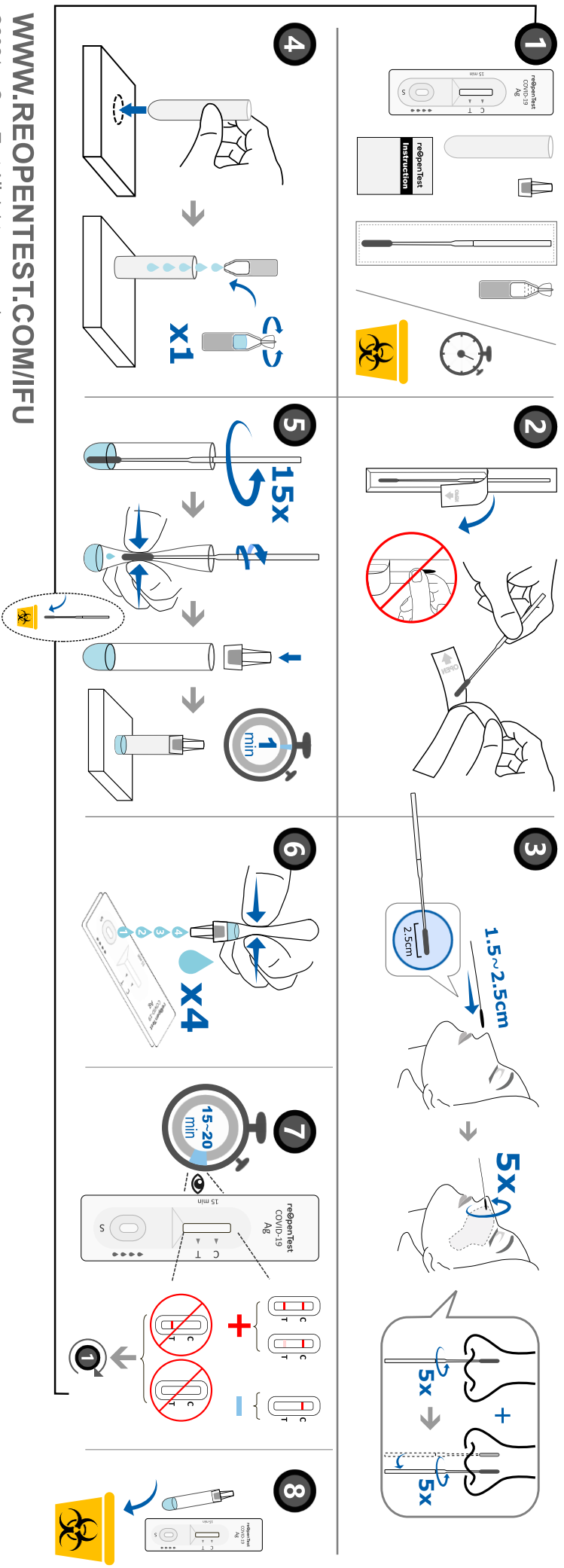

WWW.REOPENTEST.COM/IFU

©2021 reOpenTest All rights reserved.