



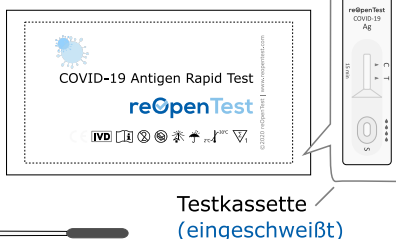

Was befindet sich in der Box?

⚠ ÜBERPRÜFEN SIE DIE VOLLZÄHLIGKEIT ALLER KOMPONENTEN!
Öffnen Sie die Bestandteile nicht vor der direkten Anwendung!!

1

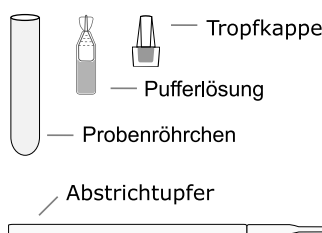

Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife



Zusätzlich Benötigte Materialien: Zeitmesser




Den Abstrichtupfer auspacken

⚠ DIE TUPFERSPITZE NICHT BERÜHREN ODER DRÜCKEN.




Abstriche aus beiden Nasenhöhlen nehmen

Führen Sie vorsichtig die Tupferspitze ein, bis sie ganz in der Nasenhöhle ist (i.d.R. **1,5cm ~ 2,5cm**) und Sie auf Widerstand treffen.
Für die Testgenauigkeit ist es wichtig, den Tupfer mindestens **5-mal** auf der Innenseite der Nasenhöhlen zu reiben.

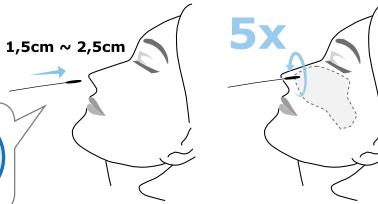

⚠ Achten Sie darauf

beide Nasenlöcher mit dem gleichen Tupfer zu reiben.

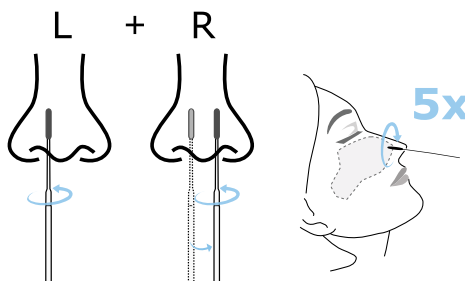

Probenverarbeitung

3

Abschrauben


Alles eingie en



Lassen Sie nach dem Umrühren den Tupfer für eine Minute im Extraktionsröhrchen stehen, damit die Probe sich weiter auflösen kann.

15x

SCHLIESSEN
DRÜCKEN

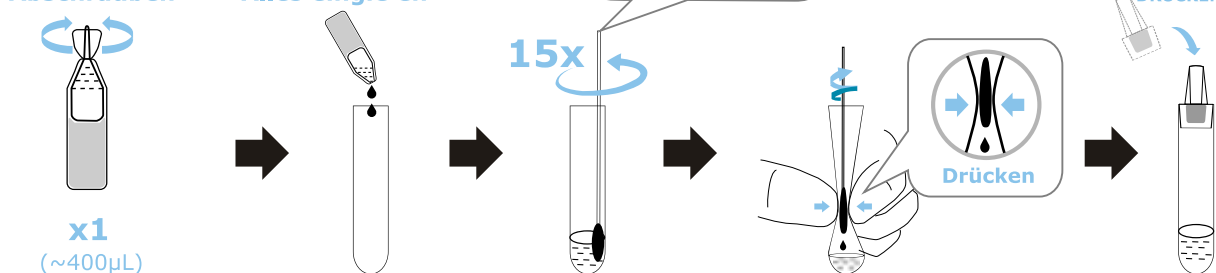

Den Test durchführen

Reißen Sie den Folienbeutel einer Testkassette auf. Legen Sie die Testkassette auf eine trockene, saubere und ebene Fläche.

Geben Sie **4 Tropfen** der Probe langsam auf die mit „S“ beschriftete Probenauftragsstelle und starten Sie die Zeitmessung



Warten Sie 10min.

Ergebnis lesen
10min. ~ 20min.


Jede hier sichtbare rosafarbene/grau T-Linie bei einer gleichzeitig sichtbaren C-Linie zeigt ein positives Ergebnis an.

©2021 reOpenTest.com



30+ min.

Nach 30 Minuten Ergebnisse nicht verwenden.


4

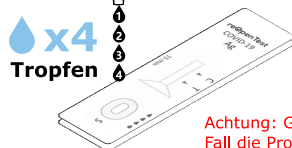


Achtung: Gießen Sie auf keinen Fall die Probe über die Testkassette.

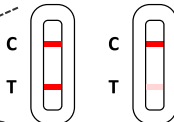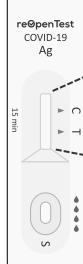

Corona Positiv

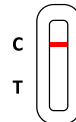

Corona Negativ

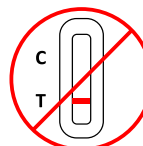

Ungültig

QUICK GUIDE

Test for self-use - Temporary special approval for self-use according to §11 MPG in Germany (BfArM GZ: 5640-S -285/21)



reOpenTest



What is included in the box?

! MAKE SURE THE TEST CONTAINS ALL COMPONENTS! DO NOT OPEN ITEMS UNTIL INSTRUCTED!!

1

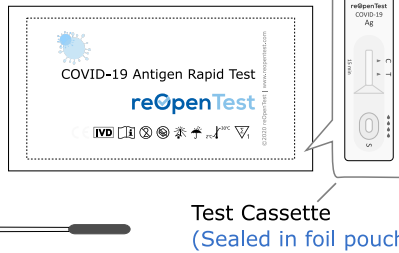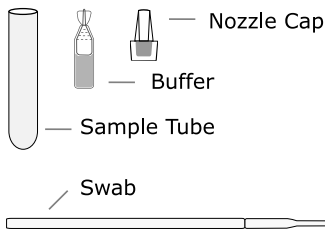

Wash hands with soap and water



Additional materials required: timer or watch




Open swab package

! DO NOT TOUCH OR PRESS ON SWAB TIP.




2

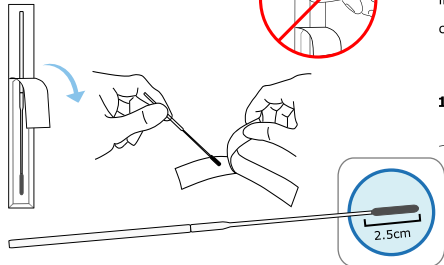


Rub the swab

Carefully insert the swab tip until it is completely in the nasal cavity (usually **1.5cm ~ 2.5cm**) and you encounter resistance. For test accuracy, it is important to rub the swab on the inside of the nasal cavities at least **5 times**.

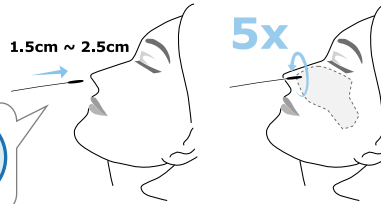

! CHECK

Be sure to rub both nostrils with the same swab.

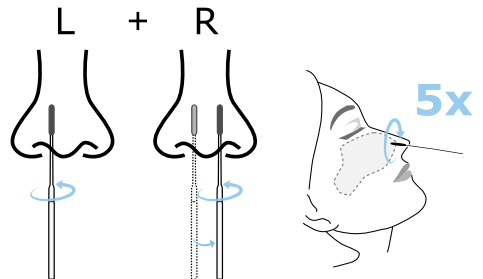

Sample processing

SCREW TO OPEN

POUR ALL






Leave the swab in the extraction vial for one minute to let samples dissolve more.

15x

CLOSE FIRMLY

3

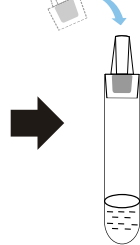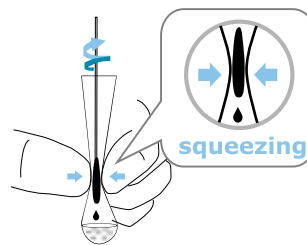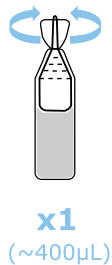

Open sealed foil pouch

Now tear the sealed foil pouch along the incision. Take the cassette flat on a clean, dry surface.

Detect

Drop **4 drops** of mixed sample slowly into the "S" well of cassette and **Start Timing**.



Wait 10min.

Read result






10min. ~ 20min.

The T line can be very faint. Any pink/gray line visible here indicates a positive result when the result is valid.



DO NOT use result after 30 minutes.

4

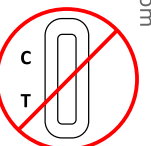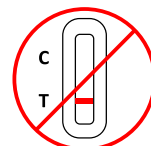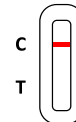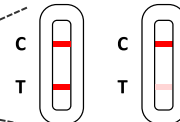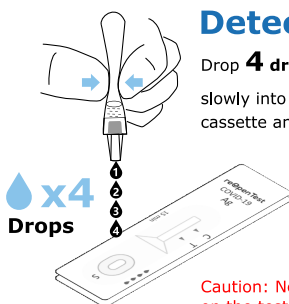

Corona Positive

Corona Negative

Invalid